

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

歯科材料5 歯科用接着充填材料
●粘着型義歯床安定用糊材 (のりタイプ/クリーム状)

金属床・プラスチック床 兼用

(販売名: コレクトクリームⅢ)



シオノギ製薬

コレクトXYLクリーム

認証番号 226ABBZX00047000
JMDNコード 16388010
機器の分類: 管理医療機器

禁忌・禁止

次の人は使用しないでください

- 1) 本品による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、はれなど)をおこしたことがある人
- 2) 入れ歯が直接ふれるところに あれ、痛み、きず、はれなどの症状のある人
- 3) 食べ物などの飲み込みが困難な人(のどに詰まるおそれがあります)

入れ歯が適合せずに歯ぐきとの間にすき間ができたり、ガタつくのはつらいものです。その不都合を一時的にやわらげるのが、入れ歯安定剤です。入れ歯安定剤には2種類あります。

- ① クッション・タイプ …… 入れ歯と歯ぐきのすき間をうめ、入れ歯を歯ぐきに吸着させ安定させます。成分はだ液などには溶けず、徐々に固くなり入れ歯に残ります。
- ② のりタイプ …… 口中の水分やだ液で粘着性を増し、入れ歯と歯ぐきを接着して安定させます。成分はだ液などにより徐々に溶けてなくなります。

コレクトXYLクリームは、このうちののりタイプの入れ歯安定剤で、特に入れ歯を歯ぐきにくっつけたい部分入れ歯の方へおすすめいたします。

……特徴……

コレクトXYLクリームは

1. キシリトールを配合したクリーム状の入れ歯安定剤です。部分入れ歯の方におすすめいたします。
2. 口の中で徐々にだ液を吸収しながら粘着性を増し、接着効果と密封効果により、入れ歯を歯ぐきに安定させる入れ歯安定剤です。
3. 入れ歯と歯ぐきを接着することにより、入れ歯がはずれそうなるのを防ぎ、話しがスムーズにできます。
4. クリーム状でやわらかく、ぬりやすい入れ歯安定剤です。
5. 金属床・プラスチック床のいずれの入れ歯にも使用できます。
6. 持続時間は入れ歯の状態、飲食の状況およびだ液の分泌量などの個人差により異なります。

……形状・構造および原理など……

【成分】 キシリトール、メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体、カルボキシメチルセルロースナトリウム、白色ワセリン、流動パラフィン、ジグリセリンパルミテート、トリグリセリンパルミテート
製品は性質上、成分の一部がだ液と一緒に口の中に溶け出したり、溶けてなくなるがありますが、溶けた成分を飲み込んで、特に問題ありません。

【形状】 淡黄色のペースト(クリーム状)

【原理】 入れ歯と口腔粘膜とを粘着力で維持させる

……使用目的……

義歯の安定(入れ歯と歯ぐきを接着して、入れ歯を安定させる)

……品目仕様……

粘着強さ 5kPa 以上 pH 値 4 ~ 10

……使用方法……


1. 使用方法

- 1) 入れ歯を歯ブラシできれいに洗い、水分をよくふき取ってください。
- 2) 上の入れ歯は図1のように歯ぐきにあたる部分から内側の斜面に数力所(チューブから0.5 ~ 2cm 出して)うすく広くのばすようにぬり、次に上顎部の中間部分にもぬってください。
下の入れ歯、部分入れ歯は図2、図3、図4のように歯ぐきのあたる部分に数力所(0.5 ~ 2cm を目安にして)ぬってください(図中の点線は歯ぐきのあたる深い溝をしめします)。口中のねばつき感を少なくするため、上・下ともに左右の端から1cm 位あけてください。
- 3) ぬる量は、入れ歯と歯ぐきのすき間の程度などにより異なります。最初は少なめにぬり、あとは経験により自分にあつた量を決めてください。(つけすぎるとはみ出したり、流れ出して口中がねばつきます)
- 4) ぬったあと、そのまま入れ歯をはめて、1~2回軽くかんでください。本品がのびてすき間がうまります。
- 5) だ液などにより徐々に溶けて本品がなくなり、入れ歯が安定しなくなることがあります。その場合は入れ歯をよく洗い、再び使用方法の通り本品をぬってください。

(図1) 上あご用



(図2) 下あご用

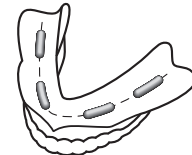

(図3) 部分入れ歯用



(図4)



2. 使用可能な入れ歯の材質、種類
 - 1) 金属床、プラスチック床の入れ歯に使用できます。
 - 2) 本品はブリッジ、さし歯および一部の部分入れ歯には使用できません。
3. 洗浄法
入れ歯や口に残った本品は、ガーゼやティッシュペーパーなどでふき取ったあと、歯ブラシなどでブラッシングして、水洗いしてください。

【使用方法に関する注意】

使用中または使用後は次のことにご注意ください。

1. 本品をつけた入れ歯は必ず就寝時にはずしてください。
2. 本品をつけたまま、入れ歯を乾燥させないでください。入れ歯をはずしたときは、必ず水またはぬるま湯に浸しておいてください。(本品をつけたまま放置し乾燥させると、固まって取れにくくなったり、取れなくなることがあります)
3. ご使用中に入れ歯をはずした場合には、接着力が弱くなりますので、あらためてぬりなおしてください。
4. 気温が低いときに固くなって出にくいことがあります。この場合は、チューブに水が入らないようにキャップをしっかりと閉め、チューブのまま4～5分を目安にお湯(40℃位)につけ、出やすくなるまであたためてください。
5. ご使用後は、キャップをしっかりと閉めてください。(チューブの中に水が入ると、中で固まって出しにくくなります)

……使用上の注意……

1. 長期連用しないでください。連用する場合には歯科医師にご相談ください。(歯ぐきがやせたり、かみ合わせが悪くなる場合があります)
2. 本品の使用または使用後に発疹・発赤、かゆみ、はれなどの症状があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師または薬剤師にご相談ください。
3. 歯ぐきがやせるなどにより不適合になった入れ歯を本品で安定させるのは一時的な場合とし、できるだけ早く歯科医師に入れ歯の調整をご相談ください。
4. ガタつきの大きい入れ歯に使用すると、十分な安定が得られないことがあります。
5. 本品を使用してもうまく安定しない場合は、歯科医師にご相談ください。

……保管および取扱い上の注意……

1. 小児の手の届かない所に保管してください。
2. 直射日光の当たらない涼しい所に、キャップをしっかりと閉めて保管してください。特に夏の自動車の中やストープのそばなど高温(40℃以上)となる場所に放置されますと、分離をおこすことがありますのでご注意ください。

……包装……

コレクトXYLクリーム：42g

……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
受付時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)

®：登録商標

販売元

塩野義製薬株式会社
大阪市中央区道修町3丁目1番8号

*製造販売元

日本ゼトック株式会社
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

- 歯ぐきがやせるなどにより不適合になった入れ歯を本品で安定させるのは、一時的な場合としてください。
- 定期的に歯科医師の診察を受け、必要な場合は入れ歯の調整を行ってください。